RIC-Otoplastiken



Otoplastiken für Hörsysteme mit ausgelagertem Hörer


Hörsysteme mit externem Hörer haben sich in den letzten Jahren immer stärker am Markt etabliert. Durch die Auslagerung des Hörers können die Hörgeräte kleiner gebaut und eine Verzerrung durch Resonanzen in der Schlauchleitung vermieden werden. Doch erst mit einer perfekt sitzenden Otoplastik, die den externen Hörer optimal im Ohr fixiert, kann das volle Potential der RIC-Hörsysteme auch genutzt werden.

Wir bieten Ihnen sowohl universelle Lösungen für mehr Flexibilität bei der vergleichenden Anpassung wie auch Otoplastiken mit der jeweiligen hersteller-/hörerspezifischen Ankopplung (soweit vorhanden) an. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Hersteller sowie die Bezeichnung des Hörersystems und die Größe des Hörers an.

Bei den abgebildeten RIC-Otoplastiken handelt es sich lediglich um eine Auswahl. Grundsätzlich können für alle gängigen RIC-Hörsysteme Otoplastiken angefertigt werden.

Folie/Easyfit für RIC universell

- hart

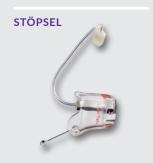

SPANGE



RIC-Folie mit Universalbuchse

- ✓ Folienotoplastik mit hohlem, dünnwandigem Gehörgang
- ✓ Digitale Fertigung
- Auch als Easyfit mit seitlichen Aussparungen für noch mehr Offenheit und Komfort
- ✓ Verbesserter Wärmeabfluss
- ✔ Hoher Tragekomfort
- Auslieferung mit Universalbuchse, die eine vergleichende Anpassung ermöglicht.
- ✓ Optimale Anbindung fast aller gängigen Ex-Hörer. Nicht für den Connexx 2.0 Hörer geeignet.
- Zusätzliches Cerumenschutzsystem integrierbar. Dieses verringert die Reparaturanfälligkeit des Hörsystems und der Filter kann problemlos vom Träger gewechselt werden.
- Zwei Bauformen der Universalbuchse (für HF4 oder ProWax – bitte angeben)
- ✓ Standardform Stöpsel, optional auch mit Abstützung: Spange kurz, Spange, Kralle, Ring, Schale

MATERIALIEN:

- CADtec
- Titan

Folie/Easyfit für RIC aus THERMOtec®

STÖPSEL



KURZSPANGE



Folienotoplastik mit einfacher Steckverbindung

- ✓ Folienotoplastik aus unserem hochwertigen, thermoflexiblen Premiummaterial THERMOtec®
- Auch als Easyfit mit seitlichen Aussparungen für noch mehr Offenheit und Komfort
- ✓ Verbesserter Wärmeabfluss
- ✓ Hoher Tragekomfort
- Auslieferung ohne Buchse*; Halt des Hörers allein durch die Materialspannung. Hierfür die Otoplastik über einer Ventilette erwärmen, Hörer mit geeignetem Werkzeug in die Bohrung einführen, abkühlen lassen.
- Zusätzliches Cerumenschutzsystem integrierbar. Dieses verringert die Reparaturanfälligkeit des Hörsystems und der Filter kann problemlos vom Träger gewechselt werden.
- Standardform Stöpsel, optional auch mit Abstützung: Spange kurz, Spange, Kralle, Ring, Schale
- * Außer bei Connexx 2.0 Hörern; hier erfolgt die Auslieferung mit dem herstellerspezifische Buchsensystem.

MATERIALIEN:

• THERMOtec®

MultiFix-Otoplastik





Universelle Lösung zur Ankopplung diverser S- und M-Hörer

- ✓ Folienotoplastik zur vorübergehenden Fixierung diverser S- und M-Hörer
- ✓ Möglichkeit der vergleichenden Anpassung mit nur einer Otoplastik
- ✓ Anstatt einer Buchse wird ein Multifix-Schlauchstück wie folgt in die Otoplastik integriert:
 - 1. Multifix-Schlauch schräg anschneiden und über den Hörer schieben.
 - 2. Schlauch mit dem Hörer in die Folienotoplastik einziehen und positionieren.
 - 3. Schlauch verkleben und trocknen lassen.
 - 4. Schlauch mit einem scharfen Skalpell bündig abschneiden und Cerumensystem einsetzen.
- ✓ Einfaches Auswechseln des MultiFix-Schlauches
- ✓ Standardform Stöpsel, optional auch mit Abstützung: Spange kurz, Spange, Kralle, Ring, Schale
- ✓ Bitte geben Sie uns bei der Bestellung die wahrscheinlich zur Anwendung kommenden Hörertypen an.

MATERIALIEN:

- CADtec
- THERMOtec®
- Titan

RIC-Otoplastik - weich hersteller-/ hörerspezifisch

STÖPSEL



KURZSPANGE



Weiche Otoplastik zur optimalen Fixierung des ausgewählten Hörers

- RIC-Otoplastik aus unserem hochwertigen Silkonmaterial
- ✓ Einpassung des ausgewählten Hörers in eine Hörertasche
- ✓ Keine Buchse und keine Verklebung notwendig: Der Hörer hält durch die Materialspannung.
- ✓ Optimale Haltgebung
- ✔ Hoher Tragekomfort
- ✓ Standardform Stöpsel, optional auch mit Abstützung: Spange kurz, Spange, Kralle, Ring, Schale
- Alle Designelemente wie Farben, Glitter, Strasssteine und Motive wählbar
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Hersteller sowie die Bezeichnung des Hörersystems und die Größe des Hörers an.

MATERIALIEN:

Silikon

RIC-Otoplastik - hart hersteller-/ hörerspezifisch

BEISPIEL OTICON





BEISPIEL PHONAK



BEISPIEL SIGNIA



BEISPIEL WIDEX



Harte Otoplastik zur optimalen Fixierung des ausgewählten Hörers

- ✓ RIC-Otoplastik aus unserem hochwertigen lichthärtenden CADtec Material
- ✓ Digitale Fertigung
- ✓ Folie, Halbfolie, Easyfit oder massive Otoplastik die mögliche Bauart ist abhängig vom ausgewählten Hörersystem (s. Tabelle)
- ✓ Standardform Stöpsel, optional auch mit Abstützung: Spange kurz, Spange, Kralle, Ring, Schale
- ✓ Auslieferung mit der jeweiligen hersteller-/hörerspezifischen Ankopplung (soweit vorhanden)
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Hersteller sowie die Bezeichnung des Hörersystems und die Größe des Hörers an.

MATERIALIEN:

• CADtec



Produktübersicht RIC-Otoplastiken

	Hörertyp	CADtec	THERMOtec®	Silikon
CONNEXX GRUPPE				
Signia	RIC 3.0 S, M, P	massiv/Folie/Easyfit	Folie / Easyfit	massiv/Folie/Easyfit
Audio Service / Signia	RIC 2.0 S, M, P	massiv/Folie/Easyfit	Folie / Easyfit	-
SONOVA GRUPPE				
Phonak/Hansaton/Unitron	S, M, P 4.0	Folie / Easyfit	Folie / Easyfit	massiv/Folie/Easyfit
Phonak/Hansaton/Unitron	XS, XP	Folie / Easyfit	Folie / Easyfit	massiv/Folie/Easyfit
GN RESOUND GRUPPE				
GN Resound/Beltone	SureFit 3 LP, MP, HP, M&RIE	massiv/Folie/Easyfit	Folie / Easyfit	massiv/Folie/Easyfit
GN Resound/Beltone	SureFit 2C LP, MP, HP	massiv/Folie/Easyfit	Folie / Easyfit	massiv/Folie/Easyfit
GN Resound/Beltone	NP	massiv	Folie / Easyfit	massiv
GN Resound/Beltone	S	Folie / Easyfit	Folie / Easyfit	massiv/Folie/Easyfit
GN Resound/Beltone	HP2	Folie / Easyfit	Folie / Easyfit	massiv/Folie/Easyfit
OTICON GRUPPE				
Bernafon	NanoRite S/M	massiv/Folie/Easyfit	Folie / Easyfit	massiv
Bernafon	PicoRite 60/85/100	massiv/Folie/Easyfit	Folie / Easyfit	massiv/Folie/Easyfit
Oticon	S/M/P	massiv/Folie/Easyfit	Folie / Easyfit	massiv
Oticon	Intiga	massiv/Folie/Easyfit	Folie / Easyfit	massiv
Oticon	Minifit 60/85/100	massiv/Folie/Easyfit	Folie / Easyfit	massiv/Folie/Easyfit
Oticon	Minifit Design 80	massiv/Folie/Easyfit	Folie / Easyfit	massiv/Folie/Easyfit
STARKEY				
Starkey	50/60 dB Snapfit	massiv/Folie/Easyfit	Folie / Easyfit	massiv/Folie/Easyfit
WIDEX				
Widex	Easywear V.2 PS/M/P	massiv/Folie/Easyfit	Folie / Easyfit	massiv/Folie/Easyfit
Widex	Easywear S/M/P	massiv/Folie/Easyfit	Folie / Easyfit	massiv/Folie/Easyfit

Standardausführung ohne Buchse

Standardausführung mit Universalbuchse

Standardausführung mit Hersteller-Buchse

Die obige Produktübersicht zeigt lediglich eine Auswahl der gängigsten sich derzeit am Markt befindlichen Außenhörersysteme. Sollten Sie Otoplastiken für andere Systeme benötigen, so sprechen Sie uns gerne an.

